



INSTRUKCJA UŻYCIA DEFIBRYLATORA ZOLL AED PLUS

Jesteś świadkiem utraty przytomności lub zastałeś leżącą, nieprzytomną osobę, zachowaj spokój. Nie bój się pomóc, AED Plus poprowadzi Cię przez całą akcję za pomocą komunikatów głosowych i tekstowych oraz aktywnych piktogramów.

AED PLUS

UWAGA! STOSUJ ZAWSZE W PRZYPADKU ZATRZYMANIA ODDECHU! WŁĄCZ URZĄDZENIE I POSTĘPUJ ZGODNIE ZE WSKAZÓWKAMI

PIKTOGRAMY	TWOJE POSTĘPOWANIE
	1. WŁĄCZ URZĄDZENIE Po włączeniu defibrylator AED Plus automatycznie wykona test sprawności i za pomocą komunikatów poinformuje Cię o gotowości pracy. POSTĘPUJ ZGODNIE Z POLECENIAMI GŁOSOWYMI I WIZUALNYMI DEFIBRYLATORA.
	2. ZACHOWAJ SPOKÓJ, SPRAWDŹ REAKCJĘ, POPROŚ O POMOC Sprawdź reakcje poszkodowanego: potrząśnij za ramiona, zapytaj, czy wszystko w porządku? Poproś osobę stojącą obok o pomoc.
	3. UDROŹNIJ DROGI ODDECHOWE, SPRAWDŹ ODDECH [OCENIAJ 10 SEKUND] Jeśli osoba nie reaguje, przysuń ucho do ust poszkodowanego, spróbuj przez 10 sekund nasłuchiwać oddechu, poczuć oddech na własnym policzku. Obserwuj, czy porusza się klatka piersiowa.
	4. POWIADOM SŁUŻBY RATOWNICZE [TEL. 112, 999 LUB INNE] Poproś wyznaczoną osobę o wezwanie służb ratowniczych. Jeżeli jesteś sam, natychmiast wezwij pomoc. Poinformuj dyspozytora o dokładnym miejscu zdarzenia, stanie poszkodowanego, jego przybliżonym wieku, ewentualnych obrażeniach. Wykonuj polecenia dyspozytora. Rozłącz się dopiero wtedy, gdy uzyskasz pozwolenie od dyspozytora, nie wcześniej!
	5. ROZPOCZNIJ RESUSCYTACJĘ KRAŻENIOWO ODDECHOWĄ [RKO 30:2] Jeśli brak oddechu, do czasu przyklejenia elektrod, prowadź resuscytację krążeniowo-oddechową w trybie 30:2. Wykonaj 30 uciśnień klatki piersiowej na głębokość 5 cm z częstotliwością co najmniej 100 / minutę. Następnie wykonaj dwa wdechy ratownicze. Jeżeli nie chcesz, nie możesz lub nie potrafisz wykonać wdechów ratowniczych, prowadź tylko uciskanie klatki piersiowej. To wystarczy!
	6. PRZYKLEJ ELEKTRODY DO ODSŁONIĘTEJ KLATKI PIERSIOWEJ PACJENTA Otwórz AED Plus podnosząc pokrywkę, rozerwij metalizowaną kopertę z elektrodą. Naklej elektrodę na odsłoniętą klatkę piersiową poszkodowanego zgodnie z instrukcją graficzną, która znajduje się na opakowaniu elektrody.
	7. NIE DOTYKAJ PACJENTA, ANALIZOWANIE Urządzenie rozpocznie analizę rytmu serca poszkodowanego, a po kilku sekundach wyda komendę dotyczącą defibrylacji. W tym czasie NIE WOLNO dotykać poszkodowanego!
	8. DEFIBRYLACJA ZALECANA. NIE DOTYKAJ PACJENTA. NACIŚNIJ MIGAJĄCY PRZYCISK DEFIBRYLACJI Jeśli zostanie zalecona defibrylacja, wydaj polecenie „ODSUNĄĆ SIĘ!”. Pamiętaj, dla Twojego bezpieczeństwa NIE DOTYKAJ poszkodowanego. Naciśnij migający czerwony przycisk.
	9. ROZPOCZNIJ RESUSCYTACJĘ KRAŻENIOWO ODDECHOWĄ [RKO 30:2] Po wykonaniu defibrylacji natychmiast rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową w trybie 30:2. Defibrylator ma wbudowaną funkcję metronomu, wyznaczającą poprawny rytm ucisków. W celu kontroli poprawności ucisków, obserwuj wyświetlacz urządzenia i wychylający się wskaźnik po prawej stronie wyświetlacza.
	10. JEŻELI DEFIBRYLACJA NIEZALECANA PROWADŹ DALEJ RKO 30:2 Po upływie dwóch minut urządzenie ponownie zacznie analizę rytmu serca poszkodowanego. Pamiętaj, aby w czasie analizowania NIE DOTYKAĆ poszkodowanego! Jeśli defibrylacja nie zostanie zalecona, rozpocznij resuscytację. Sekwencję tę powtarzaj do zaobserwowania oznak powrotu krążenia i oddechu albo, aż do przybycia służb ratowniczych.